

## LINHA - MEDICARE

### CURATIVO ADESIVO PÓS COLETA ADULTO - BEGE

Curativo adesivo pós coleta adulto - Bege Mod. CAGM-034, aplicável após punções venosas e/ou vacinas, para a proteção do local da aplicação. Amplamente utilizados, em laboratórios, clínicas e hospitais.

**REG MS/ANVISA: 80633180012**

#### Dados Técnicos Principais:

- Fácil Utilização;
- Hipoalérgico;
- Diâmetro: 25 mm;
- Método de esterilização: Óxido de etileno.
- Composição: Tecido não poroso de baixo peso, coberto uniformemente em um de seus lados com adesivo acrílico, hipoalérgico, micro poros e sensível à pressão.

#### Modo De Uso:

- Higienizar o ferimento;
- Retirar o curativo da embalagem/destacar da fita;
- Retirar a película que cobre parte da bandagem com cuidado;
- Pressionar sobre a pele, colando a fita adesiva do lado que foi removida a película protetora;
- Encostar a parte central da bandagem no ferimento;
- Retirar a película que cobre a outra parte da bandagem, com cuidado, colando-a na proximidade da pele, sem ferimento, de modo a fixar o curativo adequadamente.

#### Advertências E Precauções:

- Material descartável e de uso único, não reutilizar;
- Não usar caso embalagem estiver danificada ou violada;
- Manter fora do alcance de crianças e de animais;
- Manter o produto em ambiente seco e fresco;
- Não deixar exposto a luz solar, fontes de calor e umidade;
- Em caso de irritação, descontinuar o uso;
- Proibido reprocessar;
- Após o uso, descartar o produto em local apropriado para materiais contaminados.

#### Embalagem:

- Caixa com 500 Unidades divididas em 125 tiras com 4 curativos.

