



## LINHA - MEDICARE

### GARROTE DESCARTÁVEL PARA FLEBOTOMIA EM TIRAS

Garrote Descartável em Tiras Mod. GMGAR-003, utilizado em procedimentos médico-hospitalares e ambulatoriais que requeiram imobilização dos membros, como punções venosas, realizações de exames, transfusões de sangue e interrupções de hemorragias.

#### Dados Técnicos Principais:

- Composição: Poliisopreno sintético livre de látex;
- Material descartável e de uso único, não reutilizar;
- Dimensões: 2,5cm x 46 cm (LxC).

#### Modo De Uso:

- Deve ser colocado no braço do paciente próximo ao local da punção (4 a 5 dedos ou 10cm acima do local de punção);
- Não deve ser deixado no braço do paciente por mais de 1 minuto;
- Logo após a punção, deve-se retirar ou afrouxar o garrote, pois o garroteamento prolongado pode acarretar alteração nas análises.

#### Embalagem:

- 1 Rolo com 25 tiras de 46cm.

