

GLOBAL SWAB

Desempenho
Tecnológico
ao seu alcance



INSTRUÇÕES DE USO

NOME COMERCIAL: SWABS PARA COLETA DE AMOSTRAS – GLOBAL SWAB

PART. Nº ESPECIFICAÇÕES

GN-01	SWAB FLOCADO NASAL • DISTÂNCIA DO PONTO DE RUPTURA 80MM (DA EXTREMIDADE DA PONTA)
GN-02	SWAB FLOCADO NASAL • DISTÂNCIA DO PONTO DE RUPTURA 100MM (DA EXTREMIDADE DA PONTA)
GN-03	SWAB FLOCADO PARA GARGANTA • DISTÂNCIA DO PONTO DE RUPTURA 30MM (DA EXTREMIDADE DA PONTA)
GN-04	SWAB FLOCADO PARA GARGANTA • DISTÂNCIA DO PONTO DE RUPTURA 80MM (DA EXTREMIDADE DA PONTA)
GN-05	SWAB FLOCADO PARA GARGANTA • DISTÂNCIA DO PONTO DE RUPTURA 100MM (DA EXTREMIDADE DA PONTA)
GN-06	SWAB DE POLIÉSTER PARA GARGANTA



IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

GLOBAL TRADE TECHNOLOGY • COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP
CNPJ: 07.610.601/0001-65
AV. DOUTOR JOSÉ ANTÔNIO MIZIARA, 221 • DISTRITO INDUSTRIAL JOSÉ APARECIDO TOMÉ
CEP: 14874-002 • JABOTICABAL SP

CENTRAL DE ATENDIMENTO • (16) 4042-4000
CONTATO@GLOBALTRADEBR.COM.BR

GLOBAL SWAB

Desempenho
Tecnológico
ao seu alcance

ORAL • NASAL

DESCRIÇÃO

SWAB – COTONETE NASAL

O eixo plástico ultra flexível foi projetado ergonomicamente para otimizar a eficiência da coleta com maior conforto do paciente.

A ação capilar entre os fios de fibra de nylon facilita a forte absorção hidráulica de amostras líquidas. A amostra fica próxima da superfície, permitindo uma eluição mais fácil e rápida, o que resulta em um processamento prático mínimo da amostra.

- * Adequado para amostragem nasal e nasofaríngea.
- * Disponível no design exclusivo do ponto de interrupção do molde.

Insira um cotonete na narina paralelamente ao palato. O swab deve atingir profundidade igual à distância entre as narinas e a abertura externa da orelha. Deixe o cotonete no local por alguns segundos para absorver as secreções. Remova lentamente o cotonete girando em 360°.

SWAB – COTONETE NA GARGANTA

O cotonete consiste em uma fibra sintética girada ao redor do elegante eixo de plástico que oferece excelentes propriedades de coleta e liberação. Esse recurso o torna ideal para amostragens complexas e delicadas.

- * Adequado para a coleta de amostras, células ou fluidos traqueais para teste de DNA
- * Disponível com e sem design de ponto de interrupção moldado exclusivo

Swab de orofaríngeo (OF): Coloque o swab na faringe posterior, sem tocar a língua. Lavado/aspirado de nasofarínge ou aspirado nasal: coletar 2-3 mL em um recipiente estéril para coleta de escarro, à prova de vazamento e com tampa de rosca ou em um recipiente seco e estéril.

GLOBAL SWAB

Desempenho
Tecnológico
ao seu alcance



FINALIDADE

O produtos SWAB's para coleta de amostras estéril é utilizado na coleta de materiais para testes microbiológicos com finalidade clínica ou de pesquisa.

PRODUTO ESTÉRIL
ARTIGO MÉDICO-HOSPITALAR DE USO ÚNICO

ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO:

Armazenar e conservar o produto em sua embalagem original a temperatura controlada +4°C a +35°C.

INSTRUÇÕES DE USO:

Abrir a embalagem de modo asséptico no momento de seu uso.
Realizar a coleta do material biológico e, fazer a transferência da mesma.
Proceder a sua utilização de acordo com o protocolo do laboratório.
Após a utilização do "Swab" no teste laboratorial a ser realizado, descartar em local apropriado para materiais potencialmente contaminados.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:

Após a utilização do "Swab's" no teste laboratorial a ser realizado, descartar em local apropriado para materiais potencialmente contaminados.
Manusear os materiais destinados aos testes microbiológicos devidamente paramentado e no local especificado para os mesmos.

ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO OU ESTERILIZADO POR RAIOS GAMMA
SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR): SAC@GLOBALTRADEBR.COM.BR
REGISTRO ANVISA: 80633180038

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Francisco Innocencio Pereira
CRQ-SP: 04207127



IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

CENTRAL DE ATENDIMENTO • (16) 4042-4000
CONTATO@GLOBALTRADEBR.COM.BR