

ALUMÍNIO
ANODIZADO
não perde brilho
e não enferruja



Desmontável
ocupa pouco espaço



150 kg
suporta
maior peso

CADEIRA DE BANHO

5434 **MODELO D60**

Facilita higienização do
paciente sentado



assento frontal removível



ACESSE O VÍDEO DE MONTAGEM AQUI

ESCANEIE-ME



Cor: azul
Estrutura: Alumínio



sistema anti tombo

Cadeira para Higienização D60 em alumínio

Nº Lote: 0520

Data Fabricação: MAI/2020

Fabricado por: Zhongshan Kangdebao Rehabilitation Equipment Co.,Ltd.

Endereço: Longcheng Road, Nº 24, Dongsheng Town, Zhongshan City,
Guangdong Province, China

Importado e Distribuído no Brasil por:

Rua Henrique Rech, 312 - 95.012-613 - Caxias do Sul - Brasil

Responsável Técnico: Maria Helena Comerlato CREA/RS SP271758.

Assistência Técnica: 0800.604.8008

Código: D60

Registro ANVISA: 80795950010

Validade: indeterminada



DellaMED

www.dellamed.com.br

Manual do Usuário



7189895215703501

Parabéns!

Você adquiriu um produto que é referência em qualidade e segurança dos usuários.

Freio

Para travar a cadeira, basta empurrar as travas dos freios.

Importante:

Ao sentar ou levantar da cadeira, mantenha os freios acionados.

Conservação e Manutenção

O tempo de vida útil de uma cadeira para higienização, muito depende do cuidado com o seu uso.

Sua manutenção é simples.

1. Mantenha eixos, rolamentos das rodas e articulações lubrificadas;
2. A secagem da sua cadeira D6 0 é muito importante. Siga as orientações conforme quadro "CUIDADOS COM A SECAGEM DA SUA CADEIRA DE BANHO".
3. Evite deixar a cadeira exposta aos raios solares por longos períodos, isso evitará ressecamento e possíveis rachaduras de peças plásticas.

Cuidado!
Durante o banho, com o uso de shampoo e sabonetes, o assento pode se tornar escorregadio!

INSTALAÇÃO

Peças de montagem




1º PASSO

MONTAGEM DA ESTRUTURA PRINCIPAL

- Retire o produto da embalagem com cuidado, remova o filme plástico, posicione as duas laterais com as porcas para o lado interno (figura 1.1)

Figura 1.1 - Porcas para o lado interno

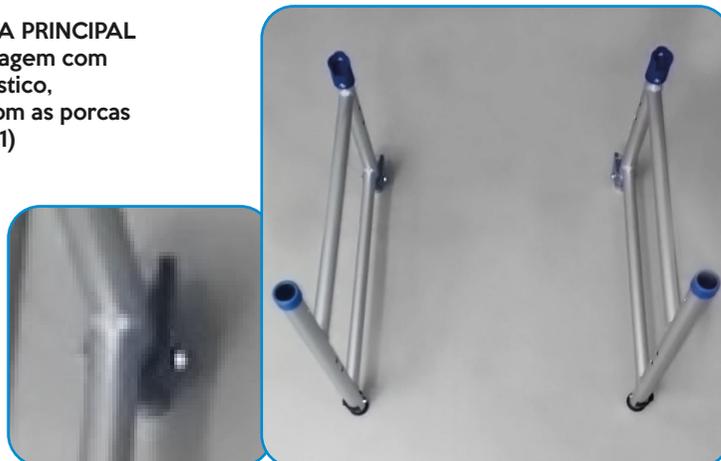

2º PASSO

MONTAGEM DA ESTRUTURA TRANSVERSAL

- Encaixe a Estrutura Transversal voltada para cima (figura 1.1).
- Fixe as Placas Retentoras com os parafusos curtos (figura 1.2).



Figura 1.1 - Estrutura Transversal voltada para cima

3º PASSO

MONTAGEM DAS RODAS

- Posicione a estrutura da cadeira com as pernas voltadas para cima (figura 1.1).
- Encaixe anel plástico de PVC e depois a Arruela de Pressão no parafuso da roda (figura 1.2).
- Trave o freio da roda para facilitar a montagem (figura 1.3).
- Encaixe na bucha de fixação e rosqueie no sentido horário até dar o aperto (figura 1.4).

Figura 1.1 - Posição da cadeira para montagem das rodas

Figura 1.2 - Encaixe da Arruela Lisa e da Arruela de Pressão

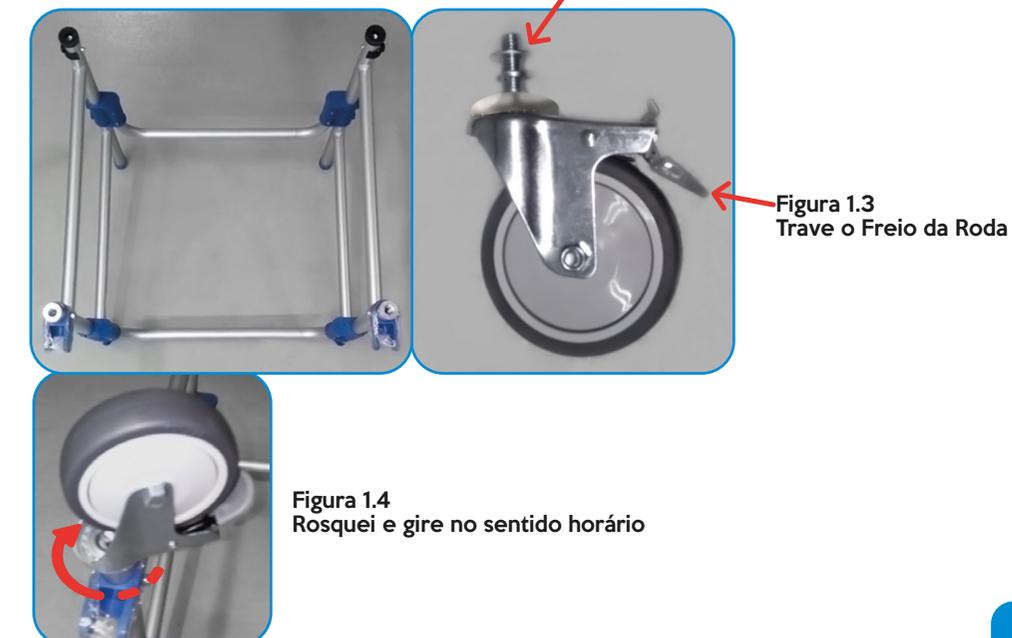


Figura 1.3 Trave o Freio da Roda

Figura 1.4 Rosqueie e gire no sentido horário

4° PASSO

MONTAGEM DO DESCANSO PARA OS PÉS

- Instale o Descanso dos Pés, posicionando nos Encaixes Plásticos e coloque os Parafusos Curtos com a área da rosca para dentro (figura 1.1), após fixe o Parafuso com a Porca.

Obs.: Os parafusos não necessitam de muito aperto, para facilitar a movimentação do descanso.

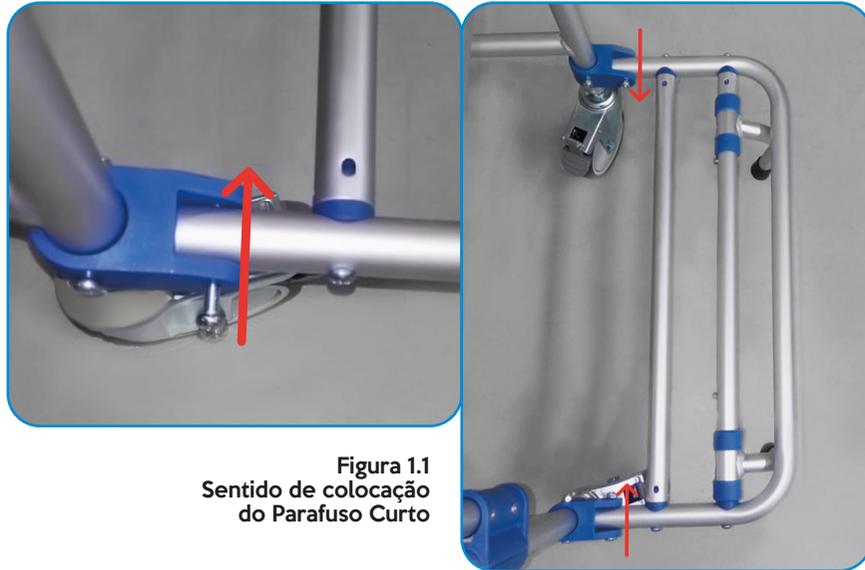


Figura 1.1
Sentido de colocação
do Parafuso Curto

5° PASSO

MONTAGEM DO ENCOSTO

- Posicione o Encosto e fixe no encaixe plástico, cuidando para que os furos fiquem alinhados para o passo seguinte da montagem dos apoios de braços (figura 1.1).

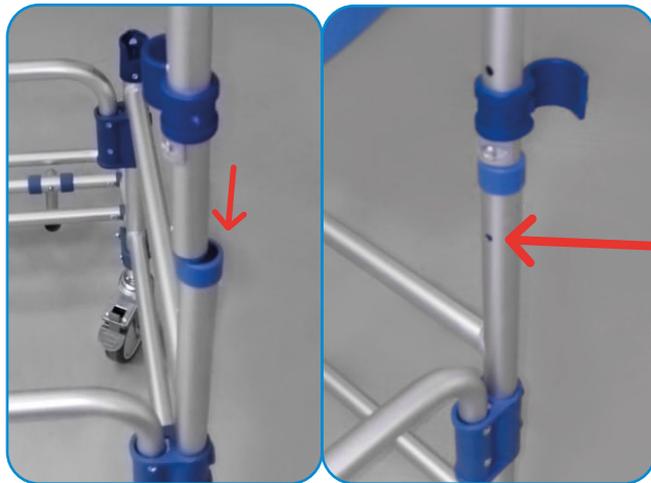


Figura 1.1 - Encaixe do Encosto
com alinhamento dos furos

6° PASSO

MONTAGEM DOS APOIOS DE BRAÇOS

- Posicione o Apoio de Braços (figura 1.1), encaixando primeiramente a parte de trás no suporte plástico (figura 1.2).

- Fixe o Parafuso Longo, colocando a Arruela Curva com a Bucha Plástica (figura 1.3).

Obs.: O sentido do parafuso deve ser de dentro para fora.

- Após, encaixe a parte da frente precisando para baixo (figura 1.4).

Figura 1.1

Posição
de montagem
do Apoio
de Braços

Figura 1.2
Encaixe no
Suporte Plástico

Figura 1.3
Parafuso
Arruela Curva
e Bucha Plástica



Figura 1.4
Encaixe frontal
do Apoio
de Braços

7° PASSO

MONTAGEM DO SUPORTE DO BALDE/COMADRE

- Encaixe o Suporte do Balde/Comadre no centro da estrutura da cadeira (figura 1.1).
- Posicione o Balde/Comadre de forma que fique centralizado no suporte (figura 1.2).

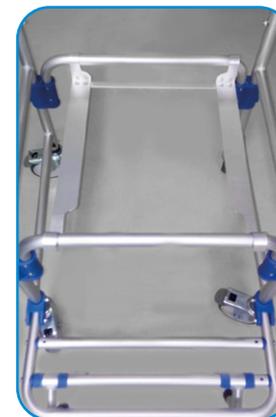


Figura 1.1
Posição de
encaixe do suporte



Figura 1.2
Posição do
Balde/Comadre

8º PASSO

MONTAGEM DO ASSENTO

- Encaixe o Assento (figura 1.1).
- Após a montagem do assento, faça uma revisão completa e sua cadeira estará pronta para uso.

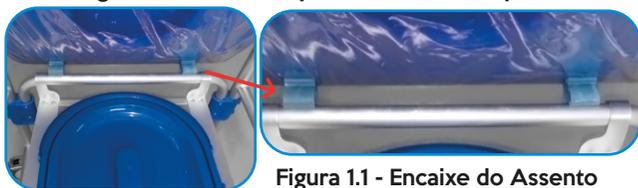


Figura 1.1 - Encaixe do Assento

CONDIÇÕES DE GARANTIA

As cadeiras de higienização Dellamed têm suas condições de garantia conforme critérios estabelecidos abaixo:

1. O prazo da garantia fornecida pela Dellamed é de 3 (três) meses para os acessórios e 12 (doze) meses para a estrutura, a partir da data da nota fiscal de compra, sendo necessária a mesma para comprovação do requerimento de garantia.

A garantia consiste em reparos e/ou substituições de peças e componentes que apresentarem falhas ou defeitos de fabricação. A decisão sobre a substituição ou reparo das partes defeituosas, será tomada segundo critérios técnicos avaliados pelo setor de Assistência Técnica da Dellamed. A garantia não inclui o desgaste natural do produto, os defeitos ocasionados pela não observação dos cuidados de uso estabelecidos no manual, os serviços de manutenção executados por conta do usuário, bem como a forma de operação inadequada do produto por parte do mesmo.

2. As cadeiras de higienização D60 são produtos mecânicos fabricados com uma estrutura em alumínio que exige manutenção constante e adequada, portanto, siga rigorosamente as dicas de conservação do produto após o uso.

3. O usuário e/ou cuidador responsável pelo paciente deve ler atentamente o manual do produto e cumprir todos as recomendações relativas à conservação e precauções com a segurança prescritas, durante o período de garantia e após, mesmo que o equipamento não esteja em uso.

4. **ATENÇÃO:** Se for constatado algum problema com o produto, o cliente deverá imediatamente entrar em contato com a assistência técnica para atendimento.

Os defeitos ou desgastes anormais não decorram especificamente de defeitos de fabricação, ou ainda:

- Decorram de negligência, atos de vandalismo, uso inadequado ou em desacordo com as recomendações da Dellamed;
 - Ausência de manutenção recomendada, equipamento ou parte dele modificado ou impropriamente manuseado;
 - Equipamento danificado pelo uso inadequado;
 - Manutenção fora das características recomendadas neste manual;
 - Utilização de peças e/ou acessórios não originais;
 - Condições anormais de ambiente tais como; temperatura excessiva, excesso de umidade sem a devida manutenção após o uso, poeira excessiva, gases, sol direto, chuvas e enchentes;
 - Se parte ou a totalidade dos materiais, ficarem depositados em local inadequado e sujeitos a ação danosa de intempéries ocasionando danos ao produto de forma que se torne impróprio para o uso seguro. No caso do produto passar por processo de adequação postural e/ou alteração de projeto, ele perderá sua garantia, conforme as seguintes situações:
- a) Quando ocorrer alteração da estrutura e características de funcionamento da cadeira;
 - b) Quando o peso do usuário, adicionado ao peso do componente alterado, ultrapassar o peso máximo garantido pela estrutura da cadeira;
 - c) Quando ocorrer alteração dos componentes tais como rodízios, encostos, elementos de fixação (parafusos, porcas e arruelas), bem como pintura e superfícies dos revestimentos.

MATERIAL


Alumínio

MEDIDAS

Altura total	96cm	Profundidade do assento	42cm	Largura do descanso para pés	22cm
Largura total	58cm	Largura do assento	44cm	Altura do descanso para pés	17cm
Comprimento	55cm	Altura interna	46cm	Largura interna	46cm

ESTRUTURA

A. Encosto	1	D. Estrutura transversal	2	G. Rodízio	4
B. Descanso para braço	2	E. Estrutura do assento	1	H. Descanso para para pés	1
C. Estrutura lateral	2	F. Balde/comadre	1	I. Ferramentas e elementos fixação	32

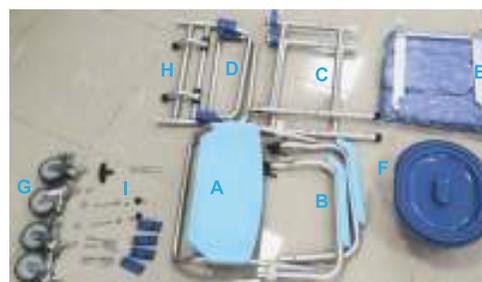

FIXAÇÃO E FERRAMENTAS

A. Chave de aperto	2
B. Arruela	4
C. Arruela curvada	4
D. Placa retentora	4
E. Parafuso curto	10
F. Parafuso longo	2
G. Porca	4
H. Encaixe plástico	2
I. Anel Elástico	4
J. Capa protetora de PVC	4
K. Rodízios com trava	4



CONHEÇA TAMBÉM OUTROS PRODUTOS DELLAMED



CAMA HOSPITALAR 2
MOV. DX
180kg | AÇO CARBONO



COLCHÃO AIR PLUS
135kg



CADEIRA DE BANHO D40
100kg | AÇO CARBONO



CADEIRA DE BANHO D50
150kg | AÇO CARBONO